

# Guía de uso de respirador N95



# 1

Lávate las manos correctamente antes de colocarlo.




# 5

Jale la banda inferior hasta que descansa justa debajo de las orejas. Ajuste la tensión de las bandas.



# 2

Tóme el respirador con una mano sujetándolo con las yemas de los dedos, dejando que las bandas cuelguen debajo de sus manos.

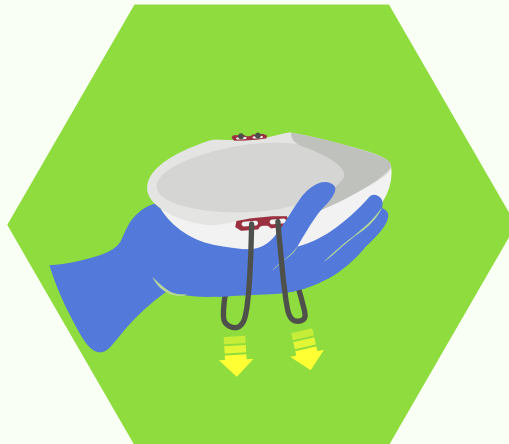

# 6

Usando ambas manos y empezando desde arriba, moldee el clip metálico alrededor de su nariz para asegurar el sellado.



# 3

Presione el respirador sobre su nariz y boca. Asegúrese que el clip metálico esté hacia arriba.



# 7


Pruebe el ajuste antes de entrar a la zona contaminada para ello realice lo siguiente:

- Cubra el respirador con ambas manos, procurando no modificar la posición del mismo.
- Inhale con energía. Deberá notar una presión negativa en el interior del respirador, si detecta alguna fuga, ajuste la posición y tensión de las bandas. Compruebe de nuevo el ajuste.

Repita el procedimiento hasta conseguir un ajuste correcto.

# 4

Jale la banda superior sobre la cabeza hasta que descansa sobre la coronilla de su cabeza, arriba de las orejas.

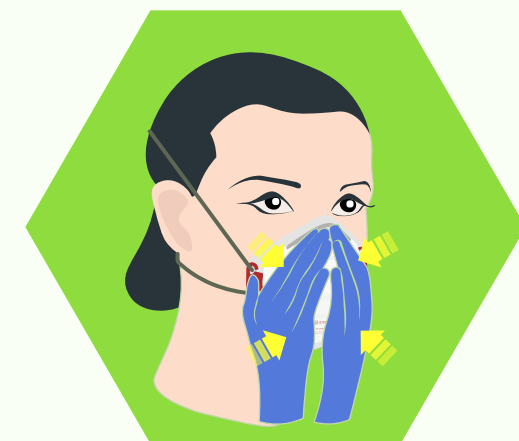

Nota. No utilizar con barba o vello facial que impida el buen contacto entre la cara y los bordes del respirador.

WWW.**JYRSA**.com

